

バーチャルスライド閲覧手順

1. <http://aperio-dmz.gene-lab.com/Login.php>にアクセスし、Login to eSlideManager（赤矢印）をクリックします。



2. LoginのUsername、Passwordを入力します。


The screenshot shows the eSlideManager Login form. The form has a dark header with the text 'eSlideManager Login' and the Leica BIOSYSTEMS logo. Below the header, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. A dark 'Login' button is located at the bottom of the form.

3. チェックボックスにチェックを入れて、「Open Data」のボタンをクリックします。


The screenshot shows the 'All Specimens' page in eSlideManager. The page has a navigation bar with tabs for 'Projects', 'Specimens', 'eSlides', and 'Administrative'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Sort', 'View Images', and 'Open Data'. A red arrow points to the 'Open Data' button. Below the buttons, there is a table with two rows. The first row has a checked checkbox, the number '01', and a 'Comment' column. The second row has a checked checkbox, the text 'バーチャルスライド', and an empty 'Comment' column. A red arrow points to the checked checkbox in the second row. At the bottom of the page, there is a pagination bar showing 'Showing Specimens 1-1 of 1' and a 'Display' dropdown menu set to '100'. The Leica BIOSYSTEMS logo and copyright notice are at the bottom of the page.

バーチャルスライド閲覧手順

4. スライド一覧の画面が表示されます。

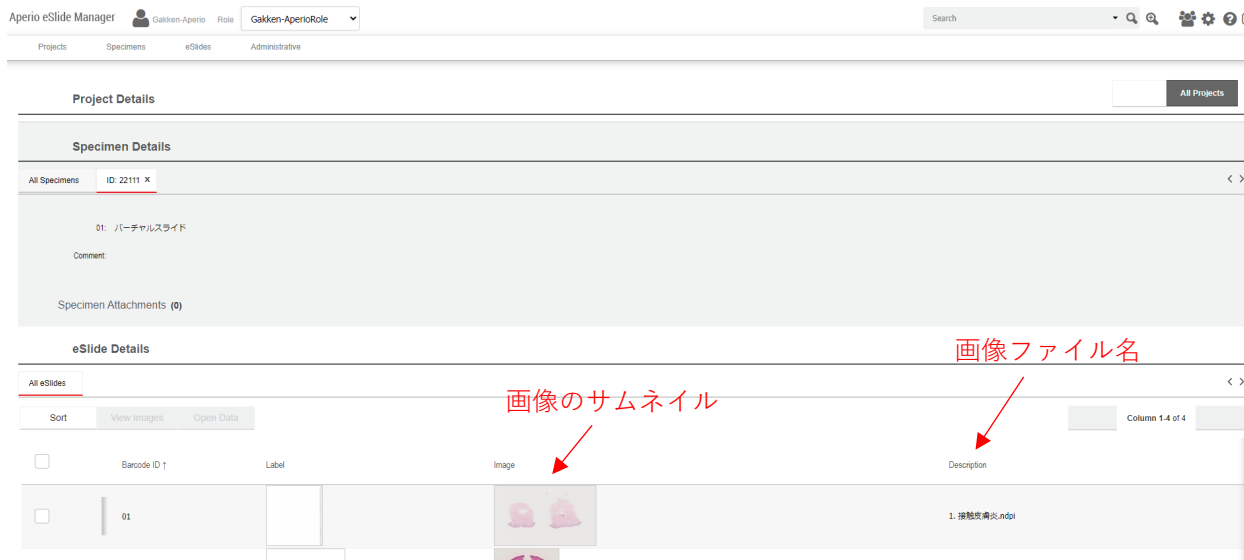

5. 閲覧する画像のチェックボックスにチェックを入れ、キーボードのWキーを押しながら、「View Images」のボタンをクリック（画像は何個でも選択可能です）

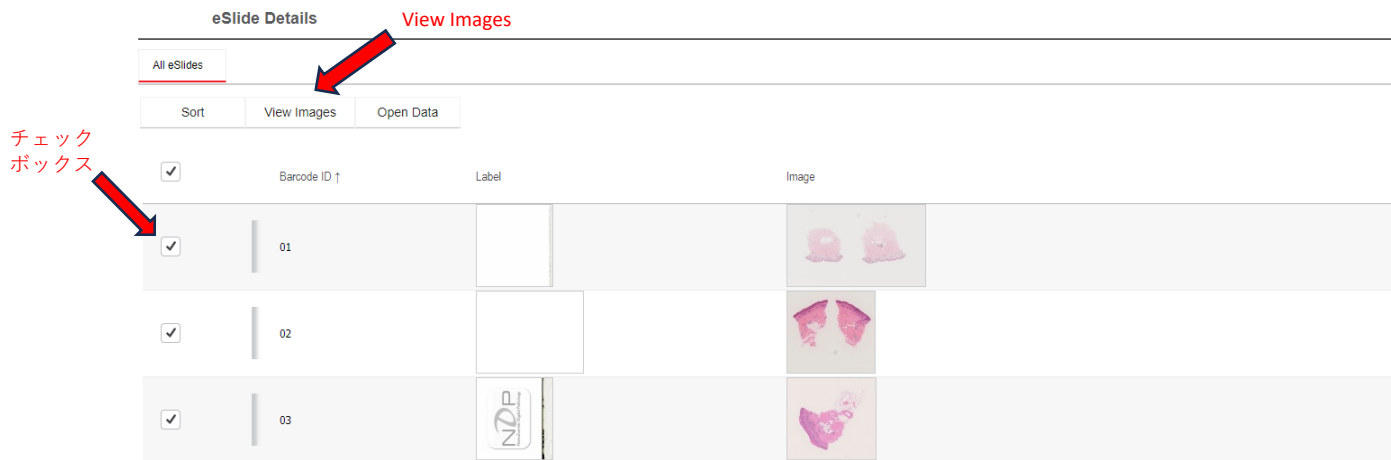


バーチャルスライド閲覧手順

4. 新規のタブでWebViewerが起動し、バーチャルスライドが表示されます。

スライダー一覧

バーチャルスライド画像

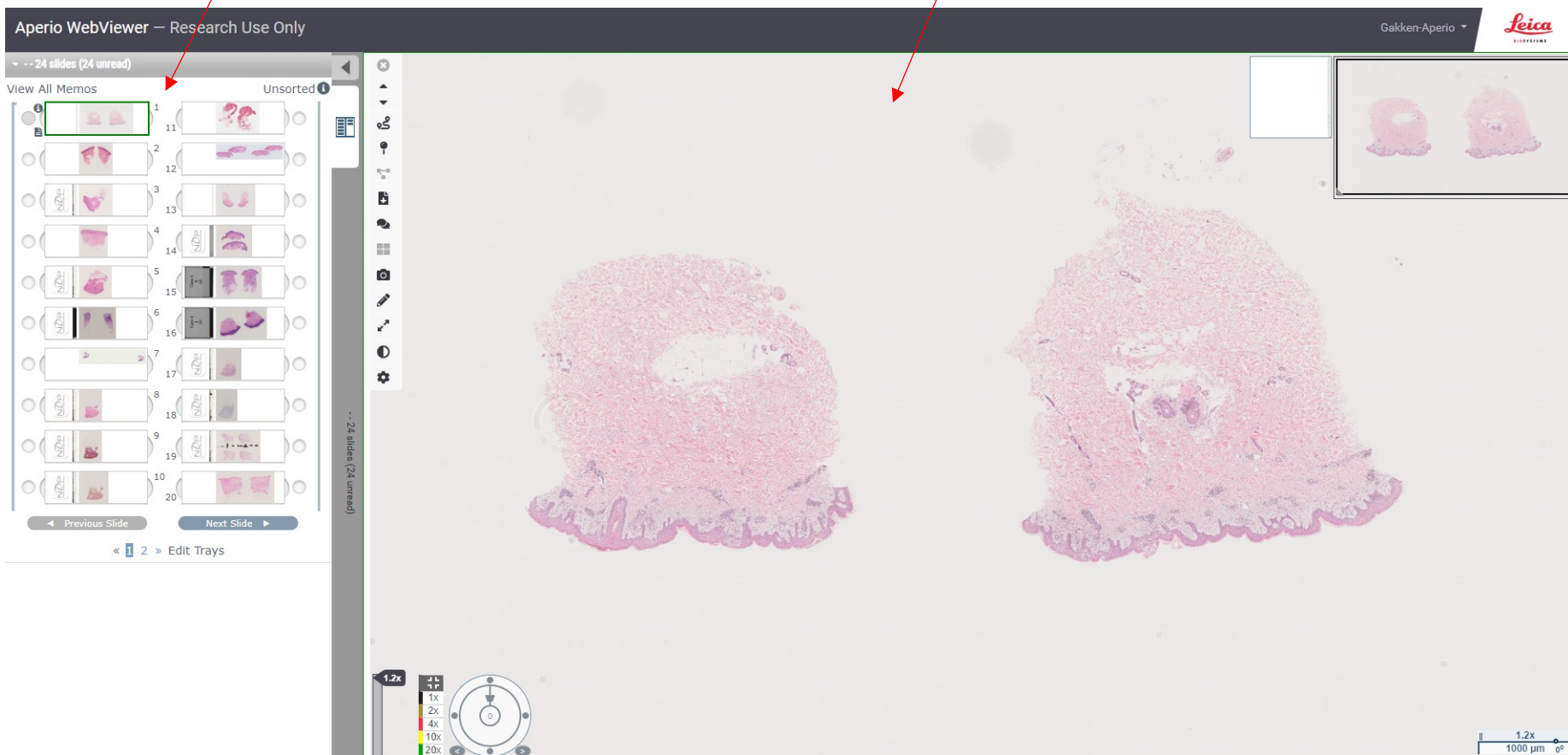

バーチャルスライド閲覧手順

5. スライド名を確認するためには、画面左のスライド一覧の ⓘマーク（上図）を選択すると、画面中央にCommentとして表示されます（下図）。

